

АБТ ЭНДОСИЛЕР

Материал для пломбирования корневых каналов зуба, совместим со всеми видами гуттаперчи.

**Инструкция по применению на медицинское изделие
Силер эндодонтический Geosoft EndoLine
по ТУ 21.20.24-001-02647415-2019
Силер эндодонтический ENDOSEAL ABT
(АБТ ЭНДОСИЛЕР),
РУ № РЗН 2024/22291 от «06» мая 2024г**

ОПИСАНИЕ:

Продукт, предназначенный для obtурации корневых каналов, обладающий достаточным временем схватывания и рентгеноконтрастностью для клинического применения. Не содержит рентгеноконтрастных добавок висмута, обеспечивает более безопасное проведение клинических процедур, не темнеет и не становится серым после отвердевания.

ФОРМА ВЫПУСКА:

- 1 флакон порошка АБТ Силер (8 г)
- 1 тубик композита АБТ Силер (9 г)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Предназначен для obtурации корневых каналов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не рекомендуется использовать продукт АБТ Силер в случае известной гиперчувствительности (аллергии) к любому из компонентов состава.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Продукт подготавливают на стеклянной пластине или специальном блоке шпателем. Насыпать необходимое количество порошка для клинического применения и добавить необходимое количество смолы. Перемешать порошок со смолой шпателем. Перемешивание производить до получения однородной массы желтоватого цвета.
2. Добавлять порошок или смолу до тех пор, пока масса продукта не поднимется на 1,5 - 2,5 см от поверхности стеклянной пластины при перемешивании шпателем. Продукт не должен разрываться, если его потянуть в направлении, противоположном от стеклянной пластины. Средняя пропорция составляет примерно 3 части порошка на 1 часть смолы по объему.
3. Просушить корневой канал, подлежащий обработке. Пасту АБТ Силер следует вводить непосредственно в корневой канал с помощью эндодонтического инструмента, такого как файл, вращающийся каналонаполнитель или гуттаперчевый конус.
4. Если необходимо, чтобы материал лучше растекался, немного подогреть стеклянную пластину и сразу же использовать материал.
5. Немедленно после использования очистить стеклянную пластину, шпатель и другие инструменты.

ПРИМЕЧАНИЕ1:

При использовании перекиси водорода в качестве раствора для орошения перед нанесением АБТ Силера рекомендуется провести повторное орошение гипохлоритом натрия и физиологическим раствором с последующим полным просушиванием.

ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ:

Это время от начала нанесения (смешивания порошка и смолы) до полного отверждения продукта. При температуре до 25°C схватывание продукта происходит в течение 60 часов. С другой стороны, при температуре тела максимальное время полимеризации составляет 24 часа после нанесения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Только для использования стоматологом, хирургом.
- Не использовать пустой пакет повторно.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Данный материал предназначен только для применения в стоматологии и должен использоваться в соответствии с инструкциями по применению.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиняемый при использовании материала в иных целях или при ненадлежащем обращении с ним, не оговоренном в настоящем руководстве. Кроме того, пользователь обязан перед использованием и под свою личную ответственность убедиться в том, что данный материал совместим с использованием по назначению, особенно если это не указано в настоящих инструкциях по применению.

- Продукт АБТ Силер не следует проглатывать или вдыхать. В случае проглатывания или вдыхания немедленно обратиться к врачу.

- Строго соблюдать указания, приводимые в инструкциях по применению.

- При возникновении острых аллергических реакций прекратить использование продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При проведении дезинфекции с использованием перекиси водорода или гипохлорита натрия тщательно просушить обрабатываемую область перед нанесением эндодонтического цемента.
- С течением времени и в зависимости от способа хранения продукт может потемнеть. Этот процесс не влияет на эффективность применения продукта.
- При работе с продуктом необходимо использовать СИЗ, в т.ч., перчатки и защитные очки. Пациентам также рекомендуется надевать защитные очки.
- Не допускать проглатывания или вдыхания посторонних предметов, смолы, порошка и неполимеризованных частиц.
- Рекомендуется избегать попадания неполимеризованного эндодонтического цемента на кожу, слизистые оболочки и в глаза. Неполимеризованный продукт может оказывать легкое раздражающее действие.
- При попадании продукта на руки промыть их большим количеством воды.
- При возникновении аллергических реакций немедленно прекратить использование продукта. При необходимости обратиться к врачу.
- Это продукт для одноразового применения.
- Повторное использование запрещается.
- Не подвергать материал воздействию температур выше 25°C.
- Не подвергать материал воздействию прямых солнечных лучей.
- Закрывать колпачки на флаконах и тубиках сразу же после использования.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ:

На данный момент побочных эффектов применения продукта не выявлено.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить продукт в оригинальной упаковке в чистом и сухом месте.


Хранить АБТ Силер в плотно закрытой упаковке, не допуская воздействия света или высокой влажности. Данный продукт рекомендуется храниться при температуре от +5 °C до +40 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:

При упаковке в соответствии с инструкциями производителя срок годности продукта составляет 24 месяца с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Не использовать готовый (замешанный) продукт повторно и утилизировать его в соответствии с местным законодательством.

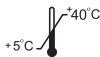

АБТ ЭНДОСИЛЕР

GOFFSSTEIN
DENTAL DEVELOPMENT

ООО «Гоффштейн Дентал Девелопмент»
Юридический адрес: 129090, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
пер. Васнецова, д.7, офис 212
Тел./Факс: +7(495) 663-22-11