

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАКОНЕЧНИКОВ

Для обеспечения длительной и безопасной работы наконечников, а также для предотвращения инфекционных рисков, необходимо строго соблюдать следующие правила их эксплуатации:

1. Дезинфекция поверхности наконечника

- После каждого использования наконечник следует обработать салфеткой, пропитанной дезинфицирующим средством (например, Трилокс). Это позволяет удалить видимые загрязнения.
- Через 5 минут после первой обработки повторно протереть наконечник чистой салфеткой, пропитанной дезинфекцией, чтобы устранить возможную биопленку.

2. Промывка рабочей части

Для удаления органических частиц рабочую часть наконечника необходимо промыть в стаканчике с чистой водой:

- Опустите рабочую часть наконечника в воду.
- Включите наконечник на 5–7 секунд для очистки внутренних каналов от остатков биологических материалов.

3. Смазка наконечника

После промывки наконечник должен быть смазан специальным маслом согласно инструкции производителя. Это обеспечивает бесперебойную работу механизма и продлевает срок службы инструмента.

4. Запаковка

Перед стерилизацией наконечник помещается в стерилизационный пакет или контейнер. Упаковка должна выполняться в соответствии с правилами, чтобы избежать повторного загрязнения.

5. Автоклавирование

Наконечники подвергаются стерилизации в автоклаве при температуре и давлении, рекомендованными производителем. Это гарантирует полное уничтожение микроорганизмов и подготовку инструментов к повторному использованию.

Важные замечания:

- Все этапы обработки наконечников должны выполняться в строгой последовательности.
- Используйте только сертифицированные дезинфицирующие средства и материалы, рекомендованные производителем.
Регулярно проверяйте состояние наконечников на наличие механических повреждений, которые могут повлиять на их работу и безопасность.

Соблюдение данных правил обеспечит надежность работы оборудования, защитит пациентов и персонал от инфекций, а также продлит срок службы наконечников.