

Инструкция по применению

Цемент цинк-сульфатный - материал пломбировочный временный безэвгенольный «Кависил» по ТУ 9391-006-10614163-99

ПУ № ФСР 2010/09820 от 23.01.2017 г.

Назначение

Для временной изоляции лекарственного вещества в кариозной полости зуба и временных пломб.

Основные свойства

Пластичная, густая, однородная паста розового цвета. Допустимое время нахождения материала в полости зуба до 30 дней. Состав: сульфат цинка, оксид цинка, полимерный пастообразователь.

Способ применения

Внести необходимое количество материала в полость зуба, сконденсировать его и очистить точки окклюзионных контактов. Время твердения пасты не более 1 часа. Пасту после использования удалить экскаватором или бором из полости зуба. Внимание: возможна аллергическая реакция на компоненты пасты

Условия хранения и транспортирования

Хранить от +4° до +25°С в плотно закрытой таре.

Утилизация отходов

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Срок годности: 2 года

Изготовитель

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.

E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru