

Инструкция по применению

Круги шлифовальные эластичные зуботехнические КШЭ - «ЦЕЛИТ» по ТУ 9391-041-10614163-2000

ПУ № ФСР 2010/08180 от 26.04.2018 г

Назначение

Круги шлифовальные эластичные зуботехнические КШЭ - «ЦЕЛИТ» предназначены для шлифования и полирования зубных ортопедических конструкций, мостовидных протезов и коронок из различных конструкционных материалов. Круги предназначены для применения в зуботехнических лабораториях.

Технические характеристики

Круги шлифовальные эластичные зуботехнические КШЭ - «ЦЕЛИТ» являются абразивным стоматологическим инструментом на вулканитовой связке. В качестве абразива используется электрокорунд различной зернистости. Типы и основные размеры выпускаемых кругов указаны в таблице:

Наименование	Диаметр наружный, мм	Толщина, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Средний ресурс, мин, не менее
ПП 18	18,0 ± 0,6	3,5 ± 0,5	2,0 ± 0,2	30
ПП 20	20,0 ± 0,6	3,5 ± 0,5	2,0 ± 0,2	30
ПП 22	22,0 ± 0,6	3,5 ± 0,5	2,0 ± 0,2	30
ПП 25	25,0 ± 0,6	3,5 ± 0,5	2,0 ± 0,2	30
ПП 50	50,0 ± 1,5	6,2 - 8,5	10,0 ± 0,5	21
ПП 90	90,0 ± 1,5	8,0 ± 0,5	8,0 - 8,5	300
ЧО 18	18 ± 0,6	3,5±0,5	2,0±0,2	30
ЧО 20	20 ± 0,6	3,5±0,5	2,0±0,2	30
ЧО 22	22 ± 0,6	3,5±0,5	2,0±0,2	30
ЧО 25	25 ± 0,6	3,5±0,5	2,0±0,2	30
ЧО 50	50 ± 1,5	8,0±0,5	10,0±0,5	210

Обработку рекомендуется проводить при скорости вращения:

ПП 18 – ПП 25, ЧО 18 – ЧО 25 - до 16000 об/мин; ПП 50, ПП 90, ЧО 50 - до 3000 об/мин.

Комплект поставки

Круги всех типоразмеров могут быть упакованы по 1, 3, 5, 10, 50, 100 шт.

Условия хранения и транспортирования

Круги в упакованном виде должны храниться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +40°C. Круги транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, при температуре от -50°C до +50°C.

Срок годности: 3 года. Номер партии и дата выпуска указаны на коробке.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие кругов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Техническое обслуживание и ремонт

Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов

Отходы после использования кругов в виде крошки и фрагментов кругов утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, класс А.

Изготовитель

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.

E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru