



### *Инструкция по применению*

**Компресс гемостатический и антисептический для альвеол**

**«Альвостаз-жгутики»**

**по ТУ 9391-019-49908538-2007**

**РУ № ФСР 2007/00883 от 06.08.2012**

#### **Показания**

Для профилактики и лечения альвеолитов.

#### **Противопоказания.**

«Альвостаз-жгутики» противопоказан больным с повышенной чувствительностью к препаратам йода. Не использовать не по назначению.

#### **Состав и свойства**

Вискозный жгутик  
Трикальций фосфат  
Эвгенол  
Масло оливковое  
Йодоформ

«Альвостаз-жгутики» представляет собой специальное средство для профилактики и лечения альвеолита. Помещенный в альвеолу «Альвостаз-жгутики» быстро снимает воспаление и боль. Материал оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем постепенно выводится наружу. Обладая слабой локальной токсичностью, не вызывает воспаления слизистой оболочки полости рта. При использовании материала как профилактического средства препараты пропитки в самое короткое время способствуют безболезненному заживлению лунки.

#### **Способ применения**

После удаления зуба необходимо провести туалет лунки. Небольшое количество жгутика аккуратно поместить в лунку. Поверх «Альвостаза» можно наложить сухой марлевый тампон. Пациента следует предупредить, что с течением времени тампон оторгнется из лунки.

Только для местного применения.

*Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.*

#### **Побочные воздействия**

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

#### **Форма выпуска и комплектация**

Жгутик (баночка) 1 см × 1 м – 1 шт.;  
Инструкция по применению – 1 шт.

#### **Условия хранения**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

#### **Условия транспортировки**

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

#### **Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

#### **Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

#### **Сведения о производителе медицинского изделия**

ООО «НКФ Омега-Дент»

Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212

Тел.: +7 (800) 500-51-92

Тел./факс: +7 (495) 679-80-53

E-mail: info@omegadent.ru

www.omegadent.ru