

**Показания и свойства**

Перелечивание корневых каналов, ранее пломбированных гуттаперчей.

В случаях повторного пломбирования корневого канала применяют специальную жидкость для распломбирования канала, запломбированного гуттаперчей, облегчающую проведение подобных манипуляций.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

**Состав**

Эвкалиптол

Цитраль

**Способ применения**

**Метод для распломбирования каналов при одном посещении.**

Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. С помощью зонда ввести две капли жидкости в полость зуба, а затем в каналы и оставить на 1 мин. с целью размягчения гуттаперчи.

Затем удалить размягченную гуттаперчу с помощью эндодонтического инструмента для обработки корневых каналов, пока не будет достигнут апекс. Периодически нужно добавлять свежий растворитель и промывать канал гипохлоритом натрия.

**Метод для распломбирования каналов при двух посещениях.**

Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. Смочить ватный тампон жидкостью для распломбирования и поместить в корневой канал, слегка спрессовав тампон. Затем закрыть временной пломбой до следующего посещения. Через 1-3 дня вскрыть временную пломбу и провести распломбирование размягченной гуттаперчи механическим путем. Это не будет представлять особой трудности. После распломбирования канал следует промыть, обезжирить и просушить с целью подготовки для последующего пломбирования.

**Меры предосторожности.** Исключить попадание в пищевод.

*Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.*

**Побочные воздействия**

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

**Форма выпуска и комплектация**

Жидкость (стеклянный флакон) 13 мл – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

**Условия хранения**

Меры предосторожности. Жидкость воспламеняема. Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C вдали от источников возгорания.

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

**Условия транспортировки**

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

**Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

**Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

**Сведения о производителе медицинского изделия**

ООО «НКФ Омега-Дент»

Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212

Тел.: +7 (800) 500-51-92

Тел./факс: +7 (495) 679-80-53

E-mail: info@omegadent.ru

www.omegadent.ru