

### *Инструкция по применению*

**Гель для протравления дентина и эмали  
«Травекс-37»  
по ТУ 9391-002-49908538-2007  
РУ № ФСР 2008/03078 от 22.07.2008**

«ТРАВЕКС-37» – это гель с оптимальным содержанием фосфорной кислоты высшей квалификации – 37 %. Оптимально подобранная вязкость геля обеспечивает максимальную рабочую характеристику. После нанесения на обрабатываемую поверхность не растекается, хорошо фиксируется на месте аппликации.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

#### **Состав**

Фосфорная кислота  
Аэросил  
Полимер  
Вода дистиллированная  
Метиленовый голубой

#### **Способ применения**

Снять защитный колпачок со шприца и насадить на его место канюлю для аппликации. Нанести путем выдавливания гель на обрабатываемый участок эмали и оставить на 20-25 сек. Удалить гель с обрабатываемого участка обильным орошением водой, пользуясь слюноотсосом и пылесосом. Просушить до полусухого состояния. Обработанная поверхность готова для дальнейших манипуляций.

**Предупреждение.** Поскольку гель содержит фосфорную кислоту – избегать попадания на слизистую оболочку и в глаза. В случае попадания на слизистую обильно промыть водой.

*Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.*

#### **Побочные воздействия**

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

#### **Форма выпуска и комплектация**

Гель (шприц) 3,5 мл – 3 шт.;  
Сменные канюли – 20 шт.

#### **Условия хранения**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.  
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

#### **Условия транспортировки**

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

#### **Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

#### **Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

#### **Сведения о производителе медицинского изделия**

ООО «НКФ Омега-Дент»  
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212  
Тел.: +7 (800) 500-51-92  
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53  
E-mail: info@omegadent.ru  
www.omegadent.ru